

販売名：NRSチタンキャニュレイテイドスクリュー
承認番号：20700BZZ00125000

TORX®
Driver Size **T30**

6.5mm キャニュレイテイド・ キャンセラスヒップスクリュー (全ねじ)



6.5mm キャニュレイティド・キャンセラスヒップスクリュー(全ねじ)


Concept

6.5mmキャニュレイティド・キャンセラスヒップスクリュー(全ねじ)はコンプレッションをかけず整復位を維持することが可能です。

Change Points

6.5mmキャニュレイティド・キャンセラスヒップスクリュー(全ねじ)に、より長いサイズ(160~180mm)が追加されました。手術器械の改良を行い、術中のスムーズな操作が可能となりました。

Figure

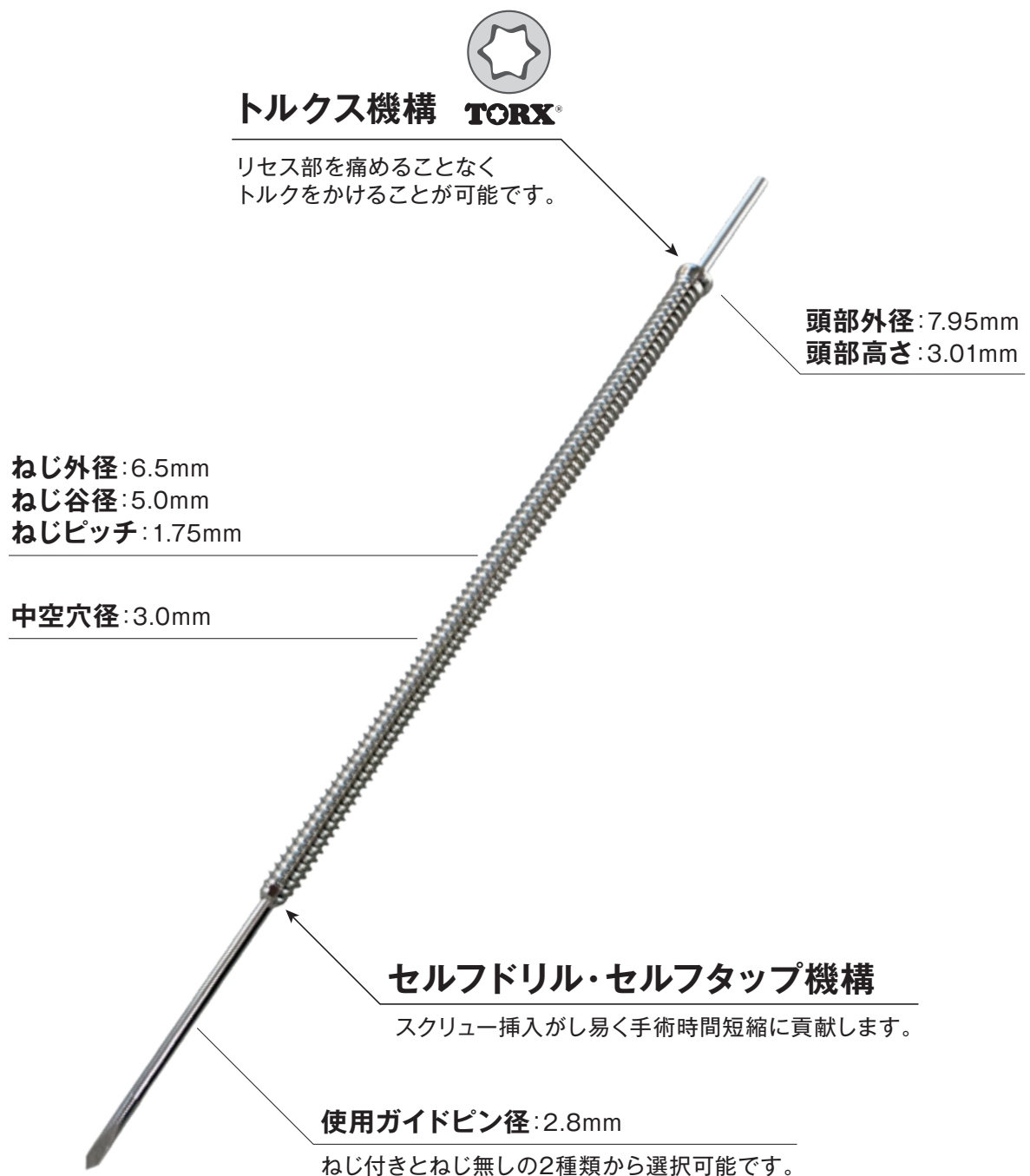

Instruments



販売名：6.5mmキャニュレイティド・キャンセラスヒップスクリュー(全ねじ)器械セット
届出番号：21B1X00003000316

名称	カタログ番号	セット入り数
ガイドピンガイド	529B-002	1
ガイドピンデプスゲージ	529B-003	1
経皮ガイドアタッチメント	529B-004	1
経皮ガイド	529B-005	1
トルクドライバー	503B-001-T30L	1
キャニュレイティドリル	500B-004-52325H	1

販売名：メイラ ガイドピン(滅菌)
認証番号：302AGBZX00115000

名称	カタログ番号	セット入り数
ガイドピン(ねじ付き)	M003A-014-28340	3
ガイドピン(ねじ無し)	M003A-015-28340	3

※ガイドピンは滅菌済で器械とは別セットとなります。

経皮ガイドアタッチメント(529B-004)/経皮ガイド(529B-005)

経皮ガイド(529B-005)はガイドピン刺入からスクリュー挿入までの一連の手技において、保護スリーブとしてご使用いただけます。 ※一部ねじの6.5mmキャニュレイティド・キャンセラスヒップスクリューにも対応可能です。

① ガイドピン刺入



経皮ガイド(529B-005)/経皮ガイドアタッチメント(529B-004)越しにガイドピンを刺入します。
骨面で滑る場合にはガイドピンガイド(529B-002)を使用できます。

② デプスゲージによる測定



経皮ガイド(529B-005)越しにガイドピンデプスゲージ(529B-003)で長さを測定し、スクリュー長を決定します。

注意：ガイドピンデプスゲージ(529B-003)を使用する際は、必ず以下のガイドピンと組み合わせて使用して下さい。
なお、正しい組み合わせでデプスゲージを使用しなかった場合、スクリューサイズの選択間違いにつながり、固定力不足や周辺組織の損傷の原因となる恐れがあります。

ガイドピンデプスゲージ	ガイドピン
529B-003	M003A-014-28340 M003A-015-28340

③ ドリリング



経皮ガイド(529B-005)越しにキャニュレイティドリル(500B-004-52325H/径5.2mm×全長325mm)にてドリリングします。なお、必要に応じ中空タップ(501B-015)にてタッピングを行って下さい。

※1：ドリリングについては手前皮質骨のみ行うことを推奨します。
※2：中空タップ(501B-015)は6.5mmキャニュレイティド・キャンセラスヒップスクリューセット内の器械です。

④ スクリュー挿入



経皮ガイド(529B-005)越しにトルクドライバー(503B-001-T30L/規格：T30/全長：348mm)もしくはトルクスパワードライバービット(503B-004-T30)にてスクリューを挿入します。

※3：トルクスパワードライバービット(503B-004-T30)は6.5mmキャニュレイティド・キャンセラスヒップスクリューセット内の器械です。

Ordering Information

●6.5mmキャニュレイティド・キャンセラスヒップスクリュー(全ねじ)



TORX®

材質:チタン合金

全長	カタログ番号	セット入り数
100mm	005A-034-100	2
110mm	005A-034-110	2
120mm	005A-034-120	2
130mm	005A-034-130	2
140mm	005A-034-140	2
150mm	005A-034-150	2
160mm	005A-034-160	2
170mm	005A-034-170	2
180mm	005A-034-180	2

●6.5mmキャニュレイティド・キャンセラスヒップスクリュー



全長	カタログ番号	セット入り数
60mm	005A-014-060	2
65mm	005A-014-065	2
70mm	005A-014-070	3
75mm	005A-014-075	3
80mm	005A-014-080	3
85mm	005A-014-085	3
90mm	005A-014-090	3
95mm	005A-014-095	3
100mm	005A-014-100	3
105mm	005A-014-105	2
110mm	005A-014-110	2
115mm	005A-014-115	2
120mm	005A-014-120	2
130mm	005A-014-130	2
140mm	005A-014-140	2
150mm	005A-014-150	2

■ 部分についてはオプションになります。

販売名: NRSチタンキャニュレイティドスクリュー
承認番号: 20700BZZ00125000

販売名: NRSチタンワッシャー
承認番号: 20900BZZ00861000

名称	カタログ番号	セット入り数
フラットワッシャー	017A-001-13007	4

※6.5mmキャニュレイティド・キャンセラスヒップスクリューは
6.5mmキャニュレイティド・キャンセラスヒップスクリュー(全ねじ)とは別セットとなります。
ご注文の際はお問い合わせ下さい。

2021年2月 ver.1

製造販売業者



メイラ 株式会社

TEL 0575-24-7059

製造業者

メイラ株式会社

問い合わせ先

メイラ株式会社 メディカル事業部 営業部 業務課 TEL 052-459-1277 (直通) / FAX 052-459-1282